

# Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie diese Information sorgfältig, weil sie Ihnen helfen wird, **HYLO®-GEL** richtig anzuwenden.

## **HYLO®-GEL** Natriumhyaluronat 2 mg/ml

Zur intensiven, therapeutischen Befeuchtung der Augenoberfläche bei stärkerem und chronischem Trockenheitsgefühl der Augen, sowie nach operativen Eingriffen am Auge.

Sterile, phosphatfreie Lösung ohne Konservierungsmittel

### Was ist **HYLO®-GEL**?

**HYLO®-GEL** ist eine sterile, phosphat- und konservierungsmittelfreie Lösung, die 2 mg/ml Natriumhyaluronat, einen Citratpuffer, Sorbitol und Wasser enthält.

### Wozu braucht man **HYLO®-GEL**?

Zur intensiven, therapeutischen Befeuchtung der Augenoberfläche bei stärkerem und chronischem Trockenheitsgefühl der Augen, sowie nach operativen Eingriffen am Auge.

### Wann sollte man **HYLO®-GEL** anwenden?

**HYLO®-GEL** enthält das Natriumsalz der Hyaluronsäure, eine natürliche Substanz, die im Auge, aber auch in anderen Körperteilen zu finden ist. Sie hat die besondere physikalische Eigenschaft, einen gleichmäßigen, stabilen und besonders lang haftenden Feuchtigkeitfilm auf der Oberfläche des Auges zu bilden, ohne rasch abgespült zu werden. Durch diese sogenannte bioadhäsive Eigenschaft werden Hornhaut und Bindehaut gepflegt und zusammen mit den natürlichen Tränen ideal gleitfähig für den Lidschlag. **HYLO®-GEL** enthält besonders viel Hyaluronsäure und ist deshalb hochviskos. Dadurch wird das Auge besonders intensiv und nachhaltig mit einem stabilen Feuchtigkeitfilm versorgt. Anhaltende oder stärkere Beschwerden werden gelindert und das Auge dauerhaft vor Reizungen geschützt.

Durch operative Eingriffe am Auge oder nach Verletzungen am Auge kann die körpereigene Tränensekretion reduziert sein. Die Regeneration der oberflächlichen Gewebe des Auges erfordert jedoch eine ständige ausreichende Befeuchtung. Durch die Anwendung von **HYLO®-GEL** werden Hornhaut und Bindehaut lang anhaltend mit Feuchtigkeit versorgt, so dass die physiologischen Heilungsprozesse optimal ablaufen können.

Aufgrund der Konservierungsmittelfreiheit wird **HYLO®-GEL** im Allgemeinen hervorragend vertragen. **HYLO®-GEL** ist darüber hinaus phosphatfrei, so dass mögliche Komplikationen durch die Bildung von Ablagerungen in der Hornhaut vermieden werden.

### Wie wendet man **HYLO®-GEL** an?



**Schritt 1**

Vor jedem Gebrauch die Kappe abnehmen.

Bitte vor der ersten Anwendung von **HYLO®-GEL** die Flasche mit der Tropferspitze senkrecht nach unten halten und so oft auf den Flaschenboden drücken, bis der erste Tropfen an der Flaschenspitze austritt.

Danach ist die Flasche für die folgenden Anwendungen gebrauchsfertig.



**Schritt 2**

Halten Sie die Flasche mit der Tropferspitze nach unten, indem Sie den Daumen auf die Flaschenschulter und die anderen Finger auf den Flaschenboden legen.



**Schritt 3**

Stützen Sie die Hand mit der **COMOD®**-Flasche wie dargestellt auf der freien Hand ab.



#### Schritt 4

Legen Sie den Kopf etwas zurück, ziehen Sie mit der freien Hand das Unterlid leicht vom Auge ab und drücken Sie schnell und kräftig in der Mitte auf den Flaschenboden. Dadurch wird der Mechanismus zur Entnahme eines Tropfens betätigt. Aufgrund der besonderen Ventiltechnik des COMOD®-Systems ist die Größe und Geschwindigkeit des Tropfens auch bei sehr kräftigem Druck auf den Flaschenboden immer gleich. Schließen Sie langsam die Augen, damit sich die Flüssigkeit gleichmäßig auf der Oberfläche des Auges verteilen kann.



#### Schritt 5

Nach Gebrauch die Tropferspitze sofort sorgfältig mit der Kappe verschließen. Bitte achten Sie darauf, dass die Tropferspitze trocken ist. Vermeiden Sie beim Tropfen einen Kontakt der Tropferspitze mit Auge oder Gesichtshaut.

Der Verkaufsware kann 10 ml Lösung entnommen werden; dies entspricht etwa 300 Tropfen. Aus produktionstechnischen Gründen bleibt stets ein kleiner Flüssigkeitsrest in der Flasche zurück.

Die Dauer der Anwendung von **HYLO®-GEL** ist nicht beschränkt.

Mit dem Inhalt einer Flasche **HYLO®-GEL** sollte immer dieselbe Person behandelt werden.

#### Welche weiteren Hinweise zur Anwendung sind zu beachten?

Für den Fall einer zusätzlichen anderen medikamentösen Behandlung mit Augentropfen sollte ein Anwendungsabstand von mindestens 30 Minuten eingehalten werden. **HYLO®-GEL** sollte dann immer zuletzt verabreicht werden. Augensalben sollten in jedem Fall nach **HYLO®-GEL** in den Bindehautsack eingestrichen werden.

Aufgrund seiner Konservierungsmittelfreiheit ist **HYLO®-GEL** auch bei langdauernder Anwendung besonders gut verträglich. In sehr seltenen Einzelfällen wurde von Überempfindlichkeitsreaktionen (Brennen, Tränenfluss) berichtet, die nach Absetzen von **HYLO®-GEL** direkt abklingen.

#### Wie oft und wie lange sollte man **HYLO®-GEL** tropfen?

**HYLO®-GEL** sollte individuell nach Ihrer Befindlichkeit und/oder der Empfehlung Ihres Augenarztes dosiert werden.

Im Allgemeinen tropfen Sie 3 mal täglich 1 Tropfen **HYLO®-GEL** in den Bindehautsack jeden Auges. Bei stärkeren Beschwerden kann **HYLO®-GEL** öfters am Tag getropft werden. Sollten Sie **HYLO®-GEL** häufiger (z. B. mehr als 10 mal täglich) anwenden, lassen Sie Ihre Augen von Ihrem Augenarzt untersuchen.

**HYLO®-GEL** ist für eine Daueranwendung geeignet, allerdings sollten Sie – wie bei allen Erkrankungen – bei länger anhaltenden Beschwerden einen Augenarzt um Rat fragen.

#### Wann sollte man **HYLO®-GEL** nicht anwenden?

**HYLO®-GEL** sollte nicht bei einer Überempfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile angewendet werden.

#### Welche Hinweise zur Aufbewahrung von **HYLO®-GEL** sind zu beachten?

Bei Raumtemperatur lagern.

Nach Anbruch einer Flasche ist **HYLO®-GEL** 12 Wochen verwendbar.

Nach Ablauf des Verfalldatums (☞) nicht mehr anwenden.

#### Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

#### Folgende Packungsgrößen sind erhältlich:

Unverkäufliches Muster: 2 ml Augentropfen

Verkaufsware: 10 ml Augentropfen

#### Stand der Information:

Januar 2009

#### Hersteller (☞):

URSAPHARM Arzneimittel GmbH & Co. KG, Industriestr., D-66129 Saarbrücken

Tel.: 06805/9292-0, Fax: 06805/9292-88, e-mail: info@ursapharm.de, www.ursapharm.de



Ihre Meinung zu unserem Produkt ist uns wichtig! Wir freuen uns, per Post,  
Fax (Nr. 06805/9292222) oder via [www.ursapharm.info/hylogel](http://www.ursapharm.info/hylogel) von Ihnen zu hören.