

## Gebrauchsinformation

Liebe Anwenderin, lieber Anwender,  
Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Fachberater in der einkaufenden Stelle.

**HYSAN** NASENSPRAY

Natriumhyaluronat 0,04 %

Zur langanhaltenden Befeuchtung der Nasenschleimhaut in Verbindung mit dem angenehmen Duft der Kamille.

15 ml isotonische Lösung ohne Konservierungsmittel

### Was ist Hysan Nasenspray?

Hysan Nasenspray ist eine Lösung zum Einsprühen in die Nase. Die Lösung enthält Natriumhyaluronat, einen natürlichen Stoff, der in vielen Körperregionen zu finden ist. Daneben enthält die Lösung noch verschiedene Salze sowie Kamillearoma als angenehme Duftkomponente. Die Zusammensetzung wurde so angepasst, dass sie den natürlichen Gegebenheiten auf der Nasenschleimhaut besonders gut entspricht.

Eine Flasche enthält 15 ml Lösung; dies entspricht ca. 105 Sprühstößen.

### Wozu dient Hysan Nasenspray?

Dieses Nasenspray dient der Befeuchtung und verbesserten Reinigung der Nasenschleimhaut und bewirkt somit eine Erleichterung der Nasenatmung. Auch bei Schnupfen ist die Anwendung als unterstützende Maßnahme angezeigt. Die spezielle Zusammensetzung der Lösung auf Basis natürlicher Substanzen in Verbindung mit dem Duft der Kamille lassen dieses Präparat hierfür besonders geeignet erscheinen.

### Wann sollte man Hysan Nasenspray anwenden?

Es kommt häufig vor, dass die Nase aufgrund besonderer Umstände bzw. Gegebenheiten ihre natürliche Feuchtigkeit verliert und „austrocknet“. Hierzu zählen nicht nur trockene Raumluft, Rauch, Staub, Wind oder Kälte, sondern auch als Folge eines Schnupfens kann es zu dem beschriebenen Beschwerdebild kommen. Es stellt sich hierbei das von vielen Menschen als unangenehm empfundene Gefühl der „trockenen Nase“ ein; durch die fehlende Feuchtigkeit wird aber auch die natürliche Reinigungsfunktion der Nasenschleimhaut ungünstig beeinflusst. Die Verwendung von Hysan Nasenspray hilft in diesen Fällen, die Nasenschleimhaut wieder anzufeuchten. Die ungehinderte Nasenatmung sowie die Reinigung der Nase wird erleichtert.

### Was ist das Besondere an Hysan Nasenspray?

Hysan Nasenspray enthält eine natürliche Substanz, Natriumhyaluronat. Diese Substanz hat zwei Eigenschaften, die sie für obigen Anwendungszweck besonders geeignet erscheinen lässt: sie haftet sehr gut auf Schleimhäuten und bildet einen lang anhaltenden Schutzfilm. Darüber hinaus besitzt sie ein hohes Wasserbindungsvermögen, oder einfacher ausgedrückt, sie ist „feuchtigkeitsbindend“.

Hysan Nasenspray enthält kein Konservierungsmittel und kein Treibgas. Da auch Natriumhyaluronat eine natürliche, körpereigene Substanz ist, wird ein unnötiges Allergierisiko vermieden.


### Welche Personen sollten Hysan Nasenspray nicht anwenden?

Aufgrund des Zusatzes von Kamillenaroma darf Hysan Nasenspray nicht bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Korbblütlern wie z. B. Arnika, Kamille, Ringelblume, Schafgarbe angewendet werden.



**URSAPHARM**  
ARZNEIMITTEL GMBH & CO. KG



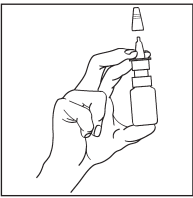

### Wie wendet man Hysan Nasenspray an?

Vor jedem Gebrauch die farbige Kappe abnehmen.

Pumpe bis zum Austritt der Lösung betätigen (in der Regel 1-2 mal). Danach ist das System für jede weitere Anwendung gebrauchsfertig.

Die Sprühöffnung in das Nasenloch einführen und einmal pumpen, dabei leicht einatmen. Je nach Bedarf mehrmals täglich 1-2 Sprühstöße in jedes Nasenloch einsprühen. Aus hygienischen Gründen bitte den Nasenadapter nach jeder Anwendung abwischen und mit der Schutzkappe verschließen.

### Hinweis zur Anwendung:

Aus hygienischen Gründen und zur Vermeidung von eventuellen Infektionsübertragungen sollte jedes Spray nur von einer Person benutzt werden. Aus diesem Grunde empfiehlt es sich auch, die Sprühöffnung nach Gebrauch abzuwischen und trocken zu halten.

### Wie oft und wie lange kann man Hysan Nasenspray anwenden?

Üblicherweise wird Hysan Nasenspray dreimal täglich je 1 bis 2 Sprühstöße in jedes Nasenloch verabreicht, es kann aber auch öfters angewandt werden. Es bestehen keine Beschränkungen in der Anwendungsdauer.

### Wie sollte man Hysan Nasenspray lagern?

Hysan Nasenspray sollte bei Raumtemperatur aufbewahrt werden und nach Ablauf des Verfalldatums (📅) nicht mehr verwendet werden.

Bewahren Sie Hysan Nasenspray außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Nach Anbruch 12 Wochen verwendbar.

Notieren Sie das Datum des Anbruchs auf dem Behältnis.

### Stand der Information:

März 2006

### Hersteller:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH & Co. KG

Industriestraße 35  
66129 Saarbrücken



### Weitere Informationen zu Hysan Nasenspray

Liebe Anwenderin, lieber Anwender!

Die Beeinträchtigung der Nasenatmung ist ein häufig auftretendes Problem.

Das in Hysan Nasenspray enthaltene Natriumhyaluronat ist ein natürlicher Stoff mit besonders positiven Eigenschaften. Hysan Nasenspray bildet einen angenehmen und lang haftenden Schutzfilm auf der Oberfläche der Schleimhaut, der nicht so rasch abgespült werden kann.

Hysan Nasenspray bietet gegenüber den herkömmlichen Salzwassersprays den Vorteil, dass man es nicht so häufig anwenden muss, um eine hohe und gleichmäßige Befeuchtung der zarten Nasenschleimhaut zu erzielen.

Hysan Nasenspray befeuchtet, pflegt und unterstützt die Selbstreinigung der Nase. Aufgrund der besonderen Ventiltechnik des Systems enthält Hysan Nasenspray keine Konservierungsstoffe, die oft allergische Reaktionen auslösen und die empfindliche Nasenschleimhaut reizen können. Der Spraymechanismus des Dosiersystems funktioniert rein mechanisch. Das Präparat enthält kein Treibmittel.

**Wir wünschen Ihnen gute Besserung!**



### Ihre Meinung ist für uns wichtig!

Damit Hysan Nasenspray noch besser an Ihre Bedürfnisse angepasst werden kann, sind uns Ihre Anregungen sehr wichtig. Bitte schreiben Sie uns!

Coupon bitte einsenden an:  
URSAPHARM Arzneimittel GmbH & Co. KG  
Industriestraße 35  
66129 Saarbrücken

oder an folgende Fax-Nummer: 0 68 05 / 92 92 222  
oder über [www.ursapharm.info/hysan](http://www.ursapharm.info/hysan)

### 1. Wann wenden Sie Hysan Nasenspray an?

- Zur Befeuchtung der Nase?
- Zur Reinigung der Nase?
- Als unterstützende Maßnahme bei Erkältung?
- Sonstiges: \_\_\_\_\_

### 2. Wie beurteilen Sie Hysan Nasenspray?

- Die Wirkung**
- Sehr gut    Gut    Teils/Teils    Schlecht    Sehr schlecht

### Die Wirkungsdauer

- Sehr gut    Gut    Teils/Teils    Schlecht    Sehr schlecht

### Die Verträglichkeit

- Sehr gut    Gut    Teils/Teils    Schlecht    Sehr schlecht

**3. Ich gebe meine Einwilligung, dass meine Daten bei URSAPHARM gespeichert werden. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben!**

.....  
Vorname, Name

.....  
Straße, Nr.

.....  
PLZ, Ort

.....  
Alter, Beruf (freiwillige Angabe)

.....  
Datum

.....  
Unterschrift